

## Assay Performance Data

<b>Naam assay:</b>	CA 125 in serum
<b>Traceerbaarheid:</b>	
Gekalibreerd naar	Referentie Fujirebio Diagnostic Standard, Inc. Maintained
<b>Referentie-interval of afkappingen</b> (kU/l)	
Herkomst referentiewaarden	< 35 Na de menopauze of hysterectomie wordt de bovengrens < 30  Bron: Bijsluiter Abbott
<b>Stabiliteit monster</b>	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee, termijn serum 3 dagen. Ja/Nee, termijn serum 5 dagen. Ja/Nee, termijn serum 3 maanden.  Bron: Quality of Diagnostic Samples <i>(3rd completely revised edition 2010)</i>
<b>Detectielimieten</b> (kU/l)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.3 0.6
<b>Imprecisie</b> (kU/l)	
Concentratie (41.2) Concentratie (318)	CV (%):2.3 CV (%):2.8
<b>Meetbereik</b> (kU/l)	
Meetbereik	1.0-1000  Eventueel: Verdunnen mogelijk Uitslagen < 1.0 worden als zodanig gerapporteerd
<b>Extern QC programma</b>	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-01-2023
-------------------	-------------------