



Assay Performance Data

Naam assay:	Bromide in serum Bromide in serum (geneesmiddel)
Traceerbaarheid	
gekalibreerd naar	ingewogen standaard
Referentie-interval of afkappingen	
<ul style="list-style-type: none"> • Bron ref-interval <ul style="list-style-type: none"> ◦ Geslachtsafhankelijkheid ◦ Leeftijdsafhankelijkheid 	zie labgids: https://www.labgids.nl/
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4°C -20°C	zie labgids: https://www.labgids.nl/
Detectielimieten	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantification)	LoD: 1,0 µmol/L LoQ: 3,0 µmol/L
Imprecisie	
Bromide concentratie: 38 µmol/L	CV(%): 9,3
Bromide (geneesmiddel) concentratie: 412 µmol/L	CV(%): 5,2
concentratie: 304 µmol/L	CV(%): 6,4
Meetbereik	
Meetbereik	<ul style="list-style-type: none"> • 10- 1000 µmol/L Uitslagen <3 worden als zodanig gerapporteerd

Extern QC programma	
EQC	Geen externe kwaliteitscontrole beschikbaar. Met ander lab wordt jaarlijks inter- laboratorium vergelijking gedraaid.

Ingevuld door: Y. van Leusden	Datum: 05-02-2021
-------------------------------	-------------------