

Performance data Subarachnoïdale bloeding m.b.v. het Bilirubine-excess

Bij de optimale cut off voor de bilirubine-Excess van  $> 0,11 \mu\text{mol/L}$  is de:

Sensitiviteit: 1.00 (95% CI, 0.96–1.00)

Specificiteit:  $> 0.83$  (95% CI, 0.74–0.91)

Hierbij is d.m.v een foutendoorrekening rekening gehouden met de analytische imprecisie de bepalingen van bilirubine in CSF en serum en albumine in CSF en serum .

Literatuur:

An improved laboratory protocol to assess subarachnoid haemorrhage in patients with negative cranial CT scan, Joke J. Apperloo, Fedde van der Graaf, Paul L.I. Dellemijn and Huib L. Vader, Clin Chem Lab Med 2006;44(8):938–948