

00000-0	Rivaroxaban – STA MAX									
	<p>Herkomst Referentie</p> <p>Onder normale omstandigheden is Rivaroxaban niet aanwezig in het bloed.</p> <p>De gewenste spiegels zijn afhankelijk van het behandelprotocol waar de patiënt binnen valt (zie Richtlijn Antitrombotisch beleid 2016)</p>									
	<p>Imprecisie</p> <table border="1"> <tr> <td>Controle level 1</td> <td>N = 25</td> <td>mean: 113 ng/ml</td> <td>VC tot = 4.4 %</td> </tr> <tr> <td>Controle level 2</td> <td>N = 25</td> <td>mean: 373 ng/ml</td> <td>VC tot = 4 %</td> </tr> </table>	Controle level 1	N = 25	mean: 113 ng/ml	VC tot = 4.4 %	Controle level 2	N = 25	mean: 373 ng/ml	VC tot = 4 %	
Controle level 1	N = 25	mean: 113 ng/ml	VC tot = 4.4 %							
Controle level 2	N = 25	mean: 373 ng/ml	VC tot = 4 %							
	<p>Meetbereik</p> <p>De ijklijn loopt van 0-500 ng/ml.</p> <p>Wanneer er een waarde boven de 500 ng/ml gemeten wordt, zal de STA automatisch een verdunning maken van 1/8 ipv 1/4.</p>									
	<p>Extern QC programma</p> <p>Twee maal per jaar wordt er meegedaan aan de ECAT enquête voor de rivaroxaban bepaling.</p>									